

Segutem® Baby Temp

Termómetro de Chupón para Bebe Mod. Nt-01 ° C

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL TERMOMETRO.

SEGUTEM® BABY TEMP, el chupón del termómetro digital esta fabricado de silicagel, que es un suave material que no lastima la boca del bebe, la temperatura se toma a través de micro electrones. Todas las piezas están diseñadas considerando que un bebe usara este termómetro, las suaves curvas del chupón y el cuerpo del termómetro están diseñadas para ellos.

ESPECIFICACIONES.

RANGO: 32.0°C ~ 42.0°C
PRECISION: +/- 0.1°C 35.0°C A 42.0°C
+/- 0.2° C DEBAJO DE 35.0° C.
PANTALLA: CRISTAL LIQUIDO 3 ½ DIGITOS.
BATERIA: UNA BATERIA 1.5V (LR41)
CONSUMO: 0.15 miliwatts
ALARMA: APROX. 4 SEG. CUANDO SE HAYA TOMADO LA TEMPERATURA MAS ALTA.

MODO DE EMPLEO

- 1.- Presione el botón on /off, se escuchara un "beep" y se leerá por 2 segundos la ultima temperatura tomada, después aparecerá L° C.
- 2.- Ponga el chupón en la boca del bebe, una vez que deje de parpadear la señal °C (usualmente en 3 minutos) la temperatura más alta se habrá tomado y se podrá leer en la pantalla.
- 3.- Presione el botón on /off para pagar el termómetro una vez que se haya tomado la temperatura, de no ser así este se apagara automáticamente 10 minutos después de que no se utilice.
- 4.- Después de limpiar y esterilizar el chupón, póngalo en su estuche y guárdelo en el botiquín o en un lugar seguro.

NOTA: EN EL PASO 1 SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ES SUPERIOR A 32.0 °C ESTA TEMPERATURA SE LEERA EN VEZ DE L°C.

PRECAUCIONES

- No tirar o golpear
- Solo el chupón es a prueba de agua, no mojar la pantalla.
- No debe sumergir el chupón en agua hirviendo, solo limpie con un paño y esterilice el chupón con alcohol (el termómetro debe estar apagado).
- No ponga en contacto el termómetro con solventes o corrosivos.
- Guarde el termómetro en un lugar fresco y seco.
- No desarme el termómetro.

REG. SSA. 2164C2002

COMERCIAL DISTRIBUIDORA APA, S.A. DE C.V.
SUR 73 # 418 COL. JUSTO SIERRA C.P. 09460
MEXICO, D.F. TEL / FAX 01 (55) 85909380
VISITENOS EN: www.codiapasa.com
E-MAIL: info@codiapasa.com
